

ご使用する前にお読みください

『商品名』：COVID-19 ANGEL・抗原検査キット（研究用）

『商品型番』：TK001

『商品内容』（20回分検査キット）：

- ① バッファー液入りチューブ×20
- ② 検体採取用綿棒×20
- ③ テストカード×20
- ④ 取扱説明書×1

操作ビデオ




同じ綿棒で両鼻孔のサンプルを採取する：

綿棒を鼻腔の2.5 cm（1インチ）まで挿入し、粘液や細胞の採取を確保できるように、鼻腔粘膜を5回こすり取る。サンプル採取が完了した後、直接にサンプルを処理することができます。


*注意事項：

1. サンプルを採取した後、できるだけ早く綿棒を処理すること。
2. 綿棒は室温、または、2-4℃で24時間保存できること。
3. 検査前に、綿棒と試薬キットを室温に戻すこと。
4. 使用する前に、説明書をよく読んでください。
5. 有効期限内にご使用ください。
6. サンプルを採取する時に、鼻の持病を持つ患者さんはご注意ください。
7. 濡れた手でテストカードを触らないで下さい、雑菌が付着する可能性があります。


操作方法の説明

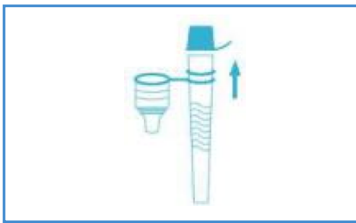

1、内容品を箱から取り出し、バッファー液入りチューブの蓋を開けます。中のバッファー液がこぼれないよう十分に注意してください。

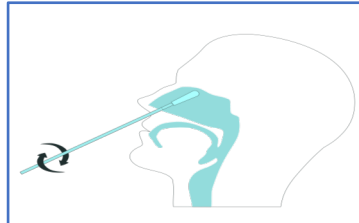

2、付属の滅菌綿棒を両鼻孔の奥まで徐々に挿入し、検体を採取します。十分な検体を採取できるように、左右4、5回回転して採取してください。

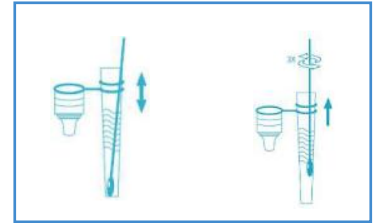


3、検体をバッファー液が入っているチューブに入れ、10～15回浸潤します。その後、チューブの両側を掴みながら、スワブ上の検体を中に残すように取り出します。



4、チューブをリッドで閉め、2回振ります。使用済みの綿棒を袋に戻し、テストカードを取り出します。




5、チューブを逆にし、検体をテストカード塗布の所に3滴垂らします。

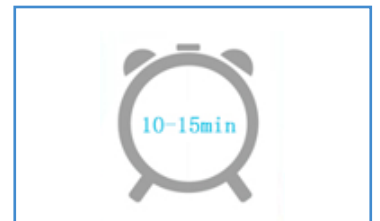

6、10分以上待てば結果判読ができます。15分以上長時間置いた後の結果には参考できません。

判読基準

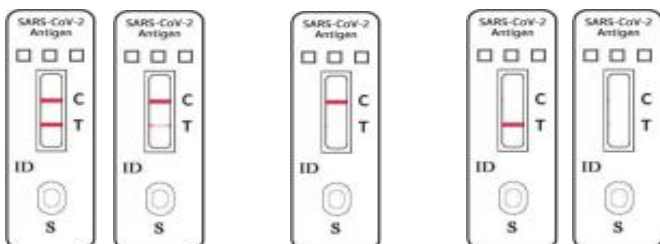

陽性

陰性

無効

*個人判断する製品ではないので、コロナウイルス感染の疑いがある場合は、必ず、最寄りの医療機関や研究センターでの調査を推奨しております。